

INNOV^{ASIS}

► C-Box[®]

Cement Restrictor PEEK Cervical IBF




C-Box® PEEK Cervical IBF

► DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sistema Cervical C-Box® PEEK IBF de Innovasis consiste en implantes de polietilétercetona diseñados para ser usados con fijación suplementaria. Los dispositivos se ofrecen en una sola medida y en diferentes alturas. El implante presenta un agujero en su centro con el fin de acomodar el injerto óseo y maximizar el crecimiento encarnado del hueso. El material cuenta con marcadores de Tantalio incorporados que permiten la visualización radiográfica de la configuración del implante durante y después de la cirugía. Los bordes del implante tienen barbas mecanizadas diseñadas para sujetar las placas vertebrales e impedir la expulsión.

El Sistema Cervical C-Box® PEEK IBF de Innovasis está diseñado para restaurar la altura en la columna vertebral cervical durante el proceso de fusión. El dispositivo tiene unas medidas de (12.5 X 13.5 mm) y permite la sujeción al hueso cortical. Su diseño abierto permite material autólogo de hueso adicional.

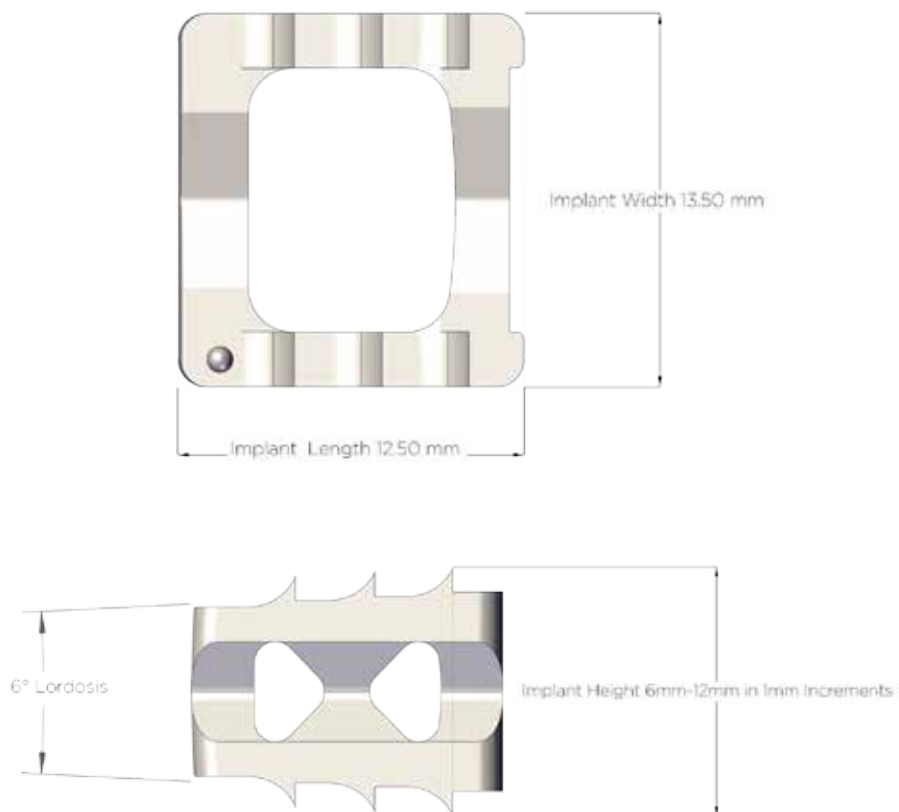

Remoción del implante

Rote la rueda contra el sentido horario para abrir el Insertor.


⚠ Nota: Un implante de la bandeja puede ser usado para verificar si el insertor está en la posición abierta.

Alinee los dedos del insertor con las ranuras del implante y avance el insertor hasta que encaje completamente con el implante.

Ajuste la rueda giratoria.

Remueva el implante del espacio del disco.

(Opcional) Utilice el Distractor Caspar Pin: Después de que el Insertor esté completamente encajado con el implante. La instrumentación Caspar pin distractor puede ser utilizada para aplicar una ligera fuerza distractora para remover el implante fácilmente.

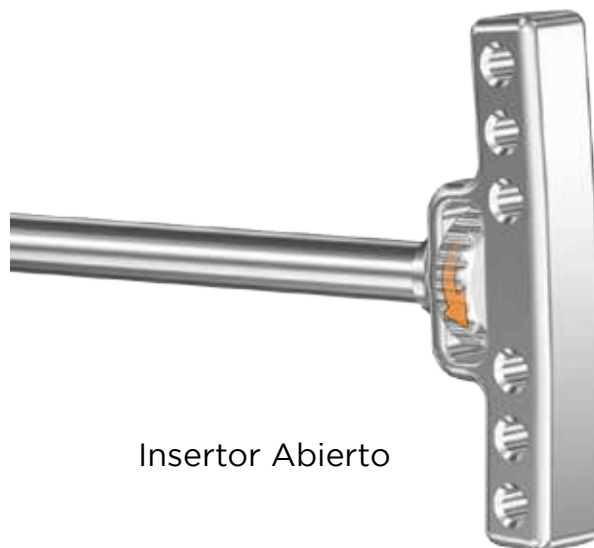

Insertor Abierto





INNOVATE / INVOLVE / INVENT

► Av. Camino Real 493
Of. 1101 - San Isidro
Lima - Lima - Perú
Tel: (511) 221-2717
Cel: 999-250-444
contactLATAM@Innovasis.com
www.innovasis.com

► 614 East 3900 South
Salt Lake City, UT 84107
Tel: +1 801.261.2236
Tel: 1 877.261.2236
Fax: +1 801.261.0573
Info@Innovasis.com
L00038 Rev A