

INNOV^ΔYSIS

▶ EXCELLA 3[®]

Sistema de Fijación Transpedicular



DE LOS IMPLANTES

TORNILLOS TRANSPEDICULARES

► Medidas de los implantes

Diámetro de tornillo	Largo	Color
4.75 mm	25-30-35-40-45 mm	Lavanda
5.5 mm	25-30-35-40-45-50-55 mm	Verde
6.5 mm	25-30-35-40-45-50-55-60 mm	Platino
7.5 mm	30-35-40-45-50-55-60 mm	Azul
8.5mm	30-35-40-45-50-55-60mm	Gris

► DISEÑO DE LA CABEZA Excella 3®

- Cabeza poliaxial, permite 360° de rotación
- Carga máxima para facilitar la inserción de las barras
- 30° de angulación alrededor del eje del tornillo
- Provee máximo contacto de interconexión entre la barra y la cabeza del tornillo

► DISEÑO DE LA ROSCA Excella 3®

- Rosca fuerte, áspera
- Doble guía que acelera el tiempo de inserción
- Autorroscante
- Punta afilada cónica para una fácil inserción
- Transición afilada de menor diámetro
- Disponible en versiones sólidas o canuladas
 - Alambre K 1.2mm para tornillos de 4.75mm
 - Alambre K 1.5mm para tornillos 5.5mm a más

► CASQUILLOS DE CIERRE

- Rosca de respaldo asegura apropiada fuerza de sujeción y resiste la retirada.



⚠ ADVERTENCIA:

Los casquillos de cierre deben ser instalados colocando la parte superior hacia arriba. Esta se identifica por la entrada de seis lóbulos y por los números de serie y parte grabados en la superficie superior.

DE LOS IMPLANTES

BARRAS

► BARRAS

- Barras curvas que reducen la necesidad de contorno
- Barras de 5.5mm de diámetro
- Barras tanto rectas como curvas se presentan en una variedad de extensiones que varían entre los 35mm y los 500mm



CONECTORES TRANSVERSALES

► Medidas de los Implantes

Tipo	Largo	Color
Fijo	30mm	Gris
Fijo	35mm	Gris
Variable	39-45mm	Gris
Variable	45-57mm	Gris
Variable	57-81mm	Gris



INSERCIÓN DE LA BARRA

Una vez que los tornillos estén colocados, ha de seleccionarse la barra del tamaño sea por ensayo sea utilizando el modelo de barra.

Si es necesario, moldear la barra sagitalmente utilizando el Alicate doblador de barra.

La barra moldeada es insertada en los tornillos comenzando por cualquiera de los extremos. La barra debe ser insertada primero en los implantes que requieren poca o nula reducción.

El sujetador de barra debe ser usado para sujetar la barra durante la inserción.

